

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE**

**PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS PARA  
EL AÑO 2024**



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA  
2024**

# INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de velar por la calidad y el buen servicio en el hospital "SAN JOSE E.S.E" se ha diseñado un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos biomédicos y odontológicos con los que cuenta el hospital y los correspondientes puestos de salud. A lo largo de este documento usted encontrará de forma detallada la descripción de cada área perteneciente al hospital con los procedimientos de mantenimientos y fechas en donde serán llevados a cabo. Todos los procedimientos descritos a continuación serán desarrollados por el personal calificado y con experiencia en el campo para asegurar al hospital y a todos los pacientes que los equipos con los que cuentan están en condiciones óptimas de trabajo.

# ÁREA DE URGENCIAS



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA  
2024**



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ

NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE URGENCIAS

No	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	MONITOR MULTIPARAMETRO DRÄGUER	Reanimación	20131995	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG, Sensor de SPO2 y NIBP, Limpieza general. Prueba de funcionamiento.
2	ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3	Reanimación	20132018	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación cable de paciente, Chupas, Clamps, Impresora. Prueba de 1mV. Prueba de funcionamiento. Limpieza general
3	DEFIBRILADOR MINDRAY	Reanimación	20131978	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Test de prueba - Verificación de batería - Impresora - Limpieza palas - Revisión general - Pruebas de funcionamiento
4	SUCCIONADOR THOMAS	Reanimación	20131363	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza exterior, Filtro, Diafragma de pistón, Válvula de admisión y de presión y mangueras. Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico, Válvula de regulación presión negativa. Prueba de funcionamiento.
5	BOMBA DE INFUSION HAWKMED	Estación de Enfermería	NA	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de batería - Cable de poder - Teclado - Limpieza general - Pruebas de funcionamiento
6	REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN CONEXIÓN DIS	Reanimación	20132051 SN:139921	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
7	LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN FIBRA OPTICA	Cuarto de medicamentos	20131072	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación estado de batería, Valvas, bombillos. Limpieza fibra óptica, Contactos eléctricos. Revisión general Prueba de funcionamiento
8	LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN BOMBILLO HALOGENO	Cuarto de medicamentos	20131071	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación estado de batería, Valvas, bombillos, Limpieza fibra óptica, Contactos eléctricos. Revisión general. Prueba de funcionamiento.



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ

NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE URGENCIAS

No	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
9	BÁSCULA DE PISO HEALTH O METER	Triage 2	20131932	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza y lubricación resortes - Ajuste del cero. Verificación peso por comparación. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
10	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY EPM-10	Triage 2	20131980	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG, Sensor de SPO2 y NIBP. Limpieza general. Prueba de funcionamiento
11	BÁSCULA BEBÉ SECA	Estación de Enfermería	20131383	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza y lubricación resortes - Ajuste del cero. Verificación peso por comparación. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
12	DOPPLER FETAL EDAN	Estación de Enfermería	20132013	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación estado de batería. Funcionamiento de transductor. Encendido y apagado. Sistema de audio. Revisión general. Prueba de funcionamiento
13	REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN CONEXIÓN DIS	Estación de Enfermería	20131883	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
14	TENSIOMETRO PEDIÁTRICO WELCH ALLYN SN 101215154053	Estación de Enfermería	20130083	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala - Revisión estado de la pera, brazalete y mangueras - Revisión de manómetro (reloj o pared) - Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide) Ajuste de cero - Lubricación - Limpieza del equipo
15	TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN SN 91006134961	Estación de Enfermería	20131482	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala - Estado de pera - Brazalete - Mangueras - Manómetro ( reloj o pared) Pruebas de funcionamiento con patrón de presión ( reloj aneroide) Ajuste de cero - Lubricación de mangueras - Limpieza del equipo
16	PULSOXIMETRO EDAN 360101- M19200980039	Estación de Enfermería	20131959	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Revisión de baterías, Sensor de SPO2, Limpieza de foto celda. Prueba de funcionamiento.



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ

NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE URGENCIAS

No	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
17	REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN CONEXIÓN DIS	Estación de Enfermería	20132024 SN 139924	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
18	REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN CONEXIÓN DIS	Estación de Enfermería	20132023 SN 139923	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
19	FONENDOSCOPIO LORD DOBLE SERV ICIO	Estación de Enfermería	NA	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza olivas, Auricular, Manguera, Campana y membrana. Pruebas de funcionamiento.
20	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED WELCH ALLYN	Consultorio 2	20131134	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio, Lentes, Sistema eléctrico y contactos. Limpieza general del equipo.
21	TENSIOMETRO DE PARED WELCH ALLYN	Consultorio 2	20131368	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala - Revisión estado de la pera, brazaletes y mangueras - Revisión de manómetro (reloj o pared) - Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajuste de cero - Lubricación - Limpieza del equipo
22	LAMPARA CIELITICA AUXILIAR BRANDON	Procedimientos y curaciones	20131330	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de protector acrílico, Panel LED, Ajuste brazo articulado. Verificación tensión entrada y salida en transformador. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
23	NEBULIZADOR DEVILBISS	Sala ERA Prestado a Fisioterapia	20130129	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza filtro. Verificación flujo de salida de aire. Nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
24	NEBULIZADOR DEVILBISS	Sala ERA	20130130	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza filtro. Verificación flujo de salida de aire. Nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
25	BÁSCULA DE PISO HEALTH O METER	Sala ERA	20131787	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza y lubricación resortes - Ajuste del cero. Verificación peso por comparación. Revisión general. Prueba de funcionamiento.



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ

NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE URGENCIAS

No	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
26	MONITOR MULTIPARAMETRO BLT M7000 M069E009883	Observación	20131280	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG. Sensor de SPO2 y NIBP. Limpieza general. Prueba de funcionamiento.
27	REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN CONEXIÓN DIS	Estación de Enfermería	20132025 SN 139924 pediatrico	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento

# ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA**  
**2024**





E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	AUTOCLAVE DENTOMAT 3400	Esterilización	20131647	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza exterior, Cámara, Empaques de la puerta, Verificación y funcionamiento válvula de seguridad y de niveles de temperatura, Limpieza resistencia, Revisión sistema eléctrico, Pruebas de funcionamiento
2	BÁSCULA BEBÉ SECA	Sala de partos	20131366	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza general Ajuste del cero Verificación peso por comparación Revisión general Prueba de funcionamiento.
3	LAMPARA AUXILIAR DE CIRUGÍA WELCH ALLYN GS-300	Sala de partos	20130383	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza bombillo. Limpieza acrílico. Verificación tensión de entrada y salida del transformador. Revisión y ajuste resorte de articulación
4	LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN FIBRA OPTICA	Sala de partos	20131077	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación estado de batería, Valvas, Bombillos, Limpieza fibra óptica, Contactos eléctricos, Revisión general, Prueba de funcionamiento
5	MESA CALOR RADIANTE CLINILAB	Sala de partos	20130381	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión sistema eléctrico. Mecanismos, Lámpara fluorescente, Resistencia, Termocuplas, Sensor de temperatura Control panel frontal. Prueba de funcionamiento (control de temperatura, alarma máxima y mínima). Limpieza general del equipo
6	MESA DE PARTOS DOMETAL	Sala de partos	20130389	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Lubricación de piezas móviles. Verificación del sistema mecánico, hidráulico y funcionamiento de posición de trendelenbur e inverso. Ajuste de estribos (perneras)
7	SUCCIONADOR QUIRURGICO THOMAS	Sala de partos	20130384	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza exterior Filtro Diafragma de pistón Válvula de admisión y de presión y mangueras. Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico Válvula de regulación presión negativa Prueba de funcionamiento.



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
8	REGULADOR DE OXIGENO AIR IMETAN CONEXIÓN DIS	Sala de partos	20132026 sn 117188	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
9	MONITOR FETAL EDAN	Maternidad	20130181	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza transductores de feto cardio Actividad uterina, Revisión estado de batería, Impresora, Limpieza general. Prueba de funcionamiento.
10	TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN SN 150723213349	Estación de Enfermería	20131983	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala. Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro, Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode), Ajustes de cero, Lubricación, Limpieza del equipo
11	PULSOXIMETRO EDAN 316036-M1280314002	Estación de Enfermería	20131248	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión de encendido - Revisión del estado físico y funcional del sensor SPO2 - Pruebas de funcionamiento
12	FONENDOSCOPIO LITTMAN	Estación de Enfermería	20131954	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza olivas, Auricular, Manguera, Campana y membrana. Pruebas de funcionamiento.
13	MONITOR MULTIPARAMETRO EDAN M8 M83031011695LB	Medicina interna mujeres	20130061	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG. Sensor de SPO2 y NIBP. Limpieza general. Prueba de funcionamiento
14	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGÜER S/N S2SNF3547	Estación de Enfermería	20232036	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG. Sensor de SPO2 y NIBP. Limpieza general. Prueba de funcionamiento
15	MONITOR MULTIPARAMETRO BLT M8000 SN M012E001829	Medicina interna hombres	20131329	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG, Sensor de SPO2 y NIBP. Limpieza general. Prueba de funcionamiento.

# **ÁREA DE CONSULTA EXTERNA**



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA**  
**2024**



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CONSULTA EXTERNA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	Consultorio 1	20130996	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio, Lentes, Sistema eléctrico y contactos. Limpieza general del equipo.
2	TENSIOMETRO DE PARED	Consultorio 1	20131714	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
3	BÁSCULA DIGITAL DE PISO SECA	Consultorio 1	20132026	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
4	BÁSCULA DE PISO	Consultorio 1	20132039	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
5	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	Consultorio 2	20131011	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio, Lentes, Sistema eléctrico y contactos. Limpieza general del equipo.
6	TENSIOMETRO DE PARED	Consultorio 2	20131012	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CONSULTA EXTERNA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
7	BÁSCULA DE PISO	Consultorio 2	20132038	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
8	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	Consultorio 3	20130985	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio, Lentes, Sistema eléctrico y contactos. Limpieza general del equipo.
9	TENSIOMETRO DE PARED	Consultorio 3	20130984	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
10	BÁSCULA DE PISO	Consultorio 3	20132040	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
11	NEGATOSCOPIO	Pasillos consultorios	20131174	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza acrílico. Verificación encendido y apagado. Estado de clavija, Cable de poder, Limpieza lámpara.
12	BÁSCULA DE PISO	Crónicos	20131716	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CONSULTA EXTERNA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
13	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	Crónicos	20131777	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio, Lentes, Sistema eléctrico y contactos. Limpieza general del equipo.
14	TENSIOMETRO DE PARED	Crónicos	20131713	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
15	BÁSCULA DE PISO	Crónicos	20132041	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
16	TENSIOMETRO ADULTO GMD SN: 17061615	Hipertensión y Diabetes	20132084	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero. Lubricación. Limpieza del equipo.
17	FONENDOSCOPIO LITTMAN	Hipertensión y Diabetes	20132042	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza olivas, Auricular, Manguera, Campana y membrana. Pruebas de funcionamiento.
18	BÁSCULA DE PISO HEALTH O METER	Consultorio 4 PyP	20131715	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CONSULTA EXTERNA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
19	DOPPLER FETAL HUNTLEIGH SN FD1PX0365704-14	Consultorio 4 PyP	20131364	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación estado de batería. Funcionamiento de transductor, encendido y apagado, Sistema de audio. Revisión general. Prueba de funcionamiento
20	TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN SN 500905183843	Consultorio 4 PyP	20131547	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
21	BÁSCULA GRAMERA	Crecimiento y Desarrollo	20130566	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso. Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación. Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
22	TENSIOMETRO ADULTO WELCH ALLYN SN 17017115809	Crecimiento y Desarrollo	20131675	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
23	TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN SN 141023134837	Crecimiento y Desarrollo	20131676	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala, Estado de la pera, Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
24	FONENDOSCOPIO LITTMAN	Crecimiento y Desarrollo	20131926	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza olivas, Auricular, Manguera, Campana y membrana. Pruebas de funcionamiento.
25	EQUIPO DE ORGANOS (Pocked junior)	Crecimiento y desarrollo	20131674	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio, Lentes. Sistema eléctrico y contactos. Limpieza general del equipo.



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CONSULTA EXTERNA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
26	BÁSCULA DE PISO	Crecimiento y Desarrollo	20132037	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
27	BÁSCULA DE PISO HEALTH O METER	Citología y Planificación	20131743	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste de cero. Limpieza escala numérica (Kg). Limpieza contrapeso, Revisión resortes, Cuchillas, Limpieza y lubricación, Verificación peso en distinto niveles. Revisión general. Prueba de funcionamiento.
28	LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS 300	Citología y Planificación	20130103	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza bombillo, Limpieza acrílico. Verificación tensión de entrada y salida del transformador. Revisión y ajuste resorte de articulación
29	DOPPLER FETAL HUNTLEIGH SN FD2P30423334-11	Citología y Planificación	20130182	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación estado de batería. Funcionamiento de transductor, encendido y apagado, Sistema de audio. Revisión general. Prueba de funcionamiento
30	ELECTROCARDIOGRAFO EDAN	Curaciones	20132056	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG, Sensor de SPO2 y NIBP. Limpieza general. Prueba de funcionamiento.



# ÁREA DE ODONTOLOGÍA



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA**  
**2024**



HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE ODONTOLOGÍA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	UNIDAD ODONTOLÓGICA	Consultorio 1	20130631	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación, Ajuste y limpieza de filtro de aire, Drenaje, Escupidera, Filtro de agua, Eyector, Cristal de lámpara, Bombillo, Pedales, Presión de aire en piezas, Brazo de lámpara, Modulo, Válvulas de agua y aire, Acople borden, Mangueras de agua-aire Jeringa triple;Empaques, Verificación sillón, Espaldar, Sistema eléctrico y mecánico. Pruebas de funcionamiento. Limpieza general.
2	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD NSK	Consultorio 1	ABHY0167	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo.Verificación de funcionamiento sistema push on. Limpieza shut. Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta. Piñones coronas. Turbina tipo paletas. Revisión general. Pruebas de funcionamiento.
3	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD COXO	Consultorio 1	L703 - 3387	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo.Verificación de funcionamiento sistema push on. Limpieza shut. Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta. Piñones coronas. Turbina tipo paletas. Revisión general. Pruebas de funcionamiento.
4	LAMPARA DE FOTOCURADO DBA	Consultorio 1	20131757	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión tarjeta electrónica, Cables, Pistola, Fibra, Filtro gama, Bombillo. Pruebas de funcionamiento con tiempo de exposición a la luz. Limpieza general. Lubricación ventilador.



HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE ODONTOLOGÍA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5	UNIDAD ODONTOLÓGICA	Consultorio 2	20130639	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación, Ajuste y limpieza de filtro de aire, Drenaje, Escupidera, Filtro de agua, Eyector, Cristal de lámpara, Bombillo, Pedales, Presión de aire en piezas, Brazo de lámpara, Modulo, Válvulas de agua y aire, Acople borden, Mangueras de agua-aire Jeringa triple;Empaques, Verificación sillón, Espaldar, Sistema eléctrico y mecánico Pruebas de funcionamiento. Limpieza general.
6	LAMPARA DE FOTOCURADO DBA	Consultorio 2	20131758	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión tarjeta electrónica, Cables, Pistola, Fibra, Filtro gama, Bombillo. Pruebas de funcionamiento con tiempo de exposición a la luz. Limpieza general. Lubricación ventilador.
7	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD NSK	Consultorio 2	ABHY0169	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo.Verificación de funcionamiento sistema push on. Limpieza shut. Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta.
8	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD COXO	Consultorio 2	M203-2615	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo.Verificación de funcionamiento sistema push on. Limpieza shut. Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta. Piñones coronas. Turbina tipo paletas. Revisión general. Pruebas de funcionamiento.



HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE ODONTOLOGÍA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
9	UNIDAD ODONTOLÓGICA	Consultorio 3	20130658	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación, Ajuste y limpieza de filtro de aire, Drenaje, Escupidera, Filtro de agua, Eyector, Cristal de lámpara, Bombillo, Pedales, Presión de aire en piezas, Brazo de lámpara, Modulo, Válvulas de agua y aire, Acople borden, Mangueras de agua-aire Jeringa triple;Empaques, Verificación sillón, Espaldar, Sistema eléctrico y mecánico Pruebas de funcionamiento. Limpieza general.
10	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD NSK	Consultorio 3	ABE30192	TRIMESTRAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo Verificación de funcionamiento
11	LAMPARA DE FOTOCURADO DBA	Consultorio 3	20131756	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Revisión tarjeta electrónica, Cables, Pistola, Fibra, Filtro gama, Bombillo. Pruebas de funcionamiento con tiempo de exposición a la luz. Limpieza general. Lubricación ventilador.
12	CAVITRON	Consultorio 3	20131494	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste y revisión de tarjeta electrónica, Válvulas, Controles, Cables, Punta, Mangueras, Sistema eléctrico. Prueba de vibraciones. Limpieza general.
13	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	Cuarto Rayos X	20131825	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación, Ajuste y limpieza de filtro de aire, Drenaje, Escupidera, Filtro de agua, Eyector, Cristal de lámpara, Bombillo, Pedales, Presión de aire en piezas, Brazo de lámpara, Modulo, Válvulas de agua y aire, Acople borden, Mangueras de agua-aire Jeringa triple;Empaques, Verificación sillón, Espaldar, Sistema
14	RAYOS X	Cuarto Rayos X	20130675	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Revisión brazo articulado, Cabezote. Funcionamiento con placa de bromuro de plata. Verificación del sistema electrónico. Limpieza general



HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE ODONTOLOGÍA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
15	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD NSK	Odontología	ABJY0063	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo. Verificación de funcionamiento sistema push on. Limpieza shut. Verificación funcionamiento  Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta. Piñones coronas. Turbina tipo paletas. Revisión general. Pruebas de funcionamiento.
16	AMALGAMADOR	Odontología	20130669	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Ajuste y revisión del motor, Controles, Sistema eléctrico mecánico, escobillas. Pruebas de funcionamiento con amalgama en diferentes velocidades. Limpieza general
17	NEGATOSCOPIO	Odontología	20131985	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza acrílica, Verificación encendido y apagado. Estado de clavija, Cable de poder, Limpieza lámpara.
18	AUTOCLAVE	Odontología	20131933	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza exterior, Cámara, Lubricación empaque puerta, Verificación funcionamiento válvula de seguridad, Niveles de temperatura y presión, Limpieza resistencia eléctrica, Prueba de funcionamiento.
19	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD NSK	Cirugía	DBEY0748	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo. Verificación de funcionamiento sistema push on. Limpieza shut. Verificación funcionamiento  Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta. Piñones coronas. Turbina tipo paletas. Revisión general. Pruebas de funcionamiento.



HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE ODONTOLOGÍA

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
20	COMPRESOR SHULTZ	Área de Compresores	20131049	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Calibración y ajuste. Revisión sistema de disparo y arranque, Escapes, Filtros, Válvulas, Sistema eléctrico, Válvula de seguridad, Tiempo de carga a 80psi. Pruebas de carga descarga, Verificación nivel de ruidos en el motor eléctrico. Revisión de rodamiento, Limpieza de equipo
21	COMPRESOR SHULTZ	Área de Compresores	20131050	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Calibración y ajuste. Revisión sistema de disparo y arranque, Escapes, Filtros, Válvulas, Sistema eléctrico, Válvula de seguridad, Tiempo de carga a 80psi. Pruebas de carga descarga, Verificación nivel de ruidos en el motor eléctrico. Revisión de rodamiento, Limpieza de equipo
22	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	Almacén	20130735	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación, Ajuste y limpieza de filtro de aire, Drenaje, Escupidera, Filtro de agua, Eyector, Cristal de lámpara, Bombillo, Pedales, Presión de aire en piezas, Brazo de lámpara, Modulo, Válvulas de agua y aire, Acople borden, Mangueras de agua-aire Jeringa triple;Empaques, Verificación sillón, Espaldar, Sistema eléctrico y mecánico Pruebas de funcionamiento. Limpieza general.
23	LAMPARA CUELLO CISNE KRAMER	Odontología	20131555	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza bombillo - Verificación cable de poder - Clavija - Socket porta bombillo - Interruptor encendido y apagado - Prueba de funcionamiento
24	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD COXO	Higiene Oral	M203-2632	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Desobstrucción de conductos de agua. Retiro de golpes en cabecita. Verificación estado de cartucho, Turbina. Ajustes de presión en 30psi. Revisión de roscas de acoples borden, Tapa superior, Empaques, Lubricación y limpieza del equipo.Verificación de funcionamiento sistema push on. Limpieza shut. Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta. Piñones coronas. Turbina tipo paletas. Revisión general. Pruebas de funcionamiento.

# ÁREA DE AMBULANCIAS



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA**  
**2024**



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA AMBULANCIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	FLUJOMETRO DE PARED	PLACA OCI 850	20131613	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación escape de oxígeno. Limpieza rotámetro. Limpieza tubo thorpe. Verificación ajuste válvula dosificadora de oxígeno. Pruebas de funcionamiento
2	FONENDOSCOPIO ADULTO (Lord)	PLACA OCI 850	20131303	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza olivas, Auricular, Manguera, Campana y membrana. Pruebas de funcionamiento.
3	MONITOR MULTIPARAMETRO	PLACA OCI 850	20131300	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG, Sensor de SPO2 y NIBP, Temperatura, Limpieza general. Prueba de funcionamiento.
4	SUCCIONADOR	PLACA OCI 850	20131306	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza exterior Filtro Diafragma de pistón Válvula de admisión y de presión y mangueras Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico Válvula de regulación presión negativa. Prueba de funcionamiento
5	REGULADOR DE OXIGENO Precalibrado	PLACA OCI 850	20131483	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno. Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión, Verificación manómetro de tipo bourdon, LPM, Verificación llave selectora de flujo, Prueba de funcionamiento.
6	TENSIOMETRO ADULTO	PLACA OCI 850	20131614	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala Estado de la pera Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
7	TENSIOMETRO PEDIATRICO	PLACA OCI 850	20131301				
8	REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE - PIND INDEX	PLACA OCI 850	20131491 Se cayó la placa	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno. Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión, Verificación manómetro de tipo bourdon, LPM, Verificación llave selectora de flujo, Prueba de funcionamiento.





E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA AMBULANCIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
9	FLUJOMETRO DE PARED	PLACA OCI 851	20131490	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación escape de oxígeno. Limpieza rotámetro. Limpieza tubo thorpe. Verificación ajuste válvula dosificadora de oxígeno. Pruebas de funcionamiento
10	FONENDOSCOPIO ADULTO	PLACA OCI 851	20131281	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza olivas, Auricular, Manguera, Campana y membrana. Pruebas de funcionamiento.
11	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	PLACA OCI 851	20131283	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza olivas, Auricular, Manguera, Campana y membrana. Pruebas de funcionamiento.
12	MONITOR MULTIPARAMETRO MEDIANA - M20	PLACA OCI 851	20131132	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Revisión cable de ECG, Sensor de SPO2 y NIBP. Temperatura. Limpieza general. Prueba de funcionamiento.
13	SUCCIONADOR	PLACA OCI 851	20131288	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza exterior Filtro Diafragma de pistón Válvula de admisión y de presión y mangueras Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico Válvula de regulación presión negativa. Prueba de funcionamiento
14	REGULADOR DE OXIGENO Precalibrado	PLACA OCI 851	20131489	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno. Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión, Verificación manómetro de tipo bourdon, LPM, Verificación llave selectora de flujo, Prueba de funcionamiento.
15	REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE - PIND INDEX	PLACA OCI 851	20131484	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno. Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión, Verificación manómetro de tipo bourdon, LPM, Verificación llave selectora de flujo, Prueba de funcionamiento.
16	TENSIOMETRO ADULTO	PLACA OCI 851	20131281	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala Estado de la pera Brazaletes, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA AMBULANCIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
17	TENSIOMETRO PEDIATRICO	PLACA OCI 851	20131282	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escala Estado de la pera Brazalete, Mangueras, Manómetro (reloj o pared). Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj anerode) Ajustes de cero, Lubricación. Limpieza del equipo.
18	SUCCIONADOR DOCTOR'S	PLACA ONI 875	20131620	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza exterior, Filtro, Diafragma de pistón, Válvula de admisión y de presión y mangueras. Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico. Válvula de regulación presión negativa. Prueba de funcionamiento.
19	FLUJOMETRO DE PARED	PLACA ONI 875	20131619	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación escape de oxígeno. Limpieza rotámetro. Limpieza tubo thorpe. Verificación ajuste válvula dosificadora de oxígeno. Pruebas de funcionamiento.
20	REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE	PLACA ONI 875	20141488	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO	Verificación de escapes de oxígeno. Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión, Verificación manómetro de tipo bourdon, LPM, Verificación llave selectora de flujo, Prueba de funcionamiento.

# **ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO**



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA**  
**2024**



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	CENTRIFUGA 24 TUBOS	20131495	TRIMENSUAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza escobillas, de colector en motor eléctrico, Porta tubos plásticos, Verificación en ruido en rodamiento motor eléctrico, Verificación tiempo de funcionamiento, Revisión general, Pruebas de funcionamiento
3	INCUBADORA	20130789	TRIMENSUAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza general, Revisión sistema eléctrico, Verificación estado de resistencia eléctrica, Control de temperatura Revisión general, Pruebas de funcionamiento
4	BAÑO MARIA	20130771	TRIMENSUAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza general del equipo, Revisión estado del tanque, Revisión sistema eléctrico, Verificación estado de resistencia eléctrica, Control de temperatura. Revisión general, Pruebas de funcionamiento
5	MICROSCOPIO	20130778	TRIMENSUAL	Marzo Junio Septiembre Diciembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza general del equipo, encendido - apagado, estado de los lentes, revisión piezas mecánicas, estado de los espejos, estado de bombillo, revisión general del equipo. Pruebas de funcionamiento.

# ÁREA DE VACUNACIÓN



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA  
2024**



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ

NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

ÁREA VACUNACIÓN							
N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	NEVERA HORIZONTAL	Vacunación	20132029	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Revisión unidad condensadora. Verificación grados de temperatura. Verificación sistema eléctrico. Limpieza y lubricación empaque puerta. Verificación y ajuste de puerta Verificación nivelación de la altura de la nevera. Verificación presiones gas refrigerante.
2	NEVERA HORIZONTAL	Vacunación	20132061	TRIMESTRAL			
3	NEVERA VERTICAL	Vacunación	20130709	TRIMESTRAL			
4	AIRE ACONDICIONADO	Vacunación	20131708	MENSUAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros; Limpieza unidad condensadora; Revisión general de sistema de drenaje; Revisión niveles de aceite refrigerante; Revisión de fugas.
5	AIRE ACONDICIONADO Tipo ventana	Vacunación	20130706	MENSUAL			
6	TERMOHIGROMETRO	Vacunación	N.A	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Verificación temperatura de entrada. Verificación temperatura de salida. Verificación estado de baterías alcalina AAA. Revisión general del equipo y pruebas de funcionamiento.
7	TERMOHIGROMETRO	vacunación	N.A	TRIMESTRAL			

**ÁREA DE FISIOTERAPIA**



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA**  
**2024**



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

FISIOTERAPIA						
N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE
1	ULTRASONIDO	Fisioterapia	20131805	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO
2	CAMINADORA	Fisioterapia	20131806	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO
3	ELÍPTICA	Fisioterapia	20131807	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO
4	BICICLETA ESTÁTICA	Fisioterapia	20131808	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO
5	RESTAURADOR	Fisioterapia	20131816	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO
6	MASAJEADOR ELÉCTRICO	Fisioterapia	N/A	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO
7	TENS	Fisioterapia	20131911	TRIMESTRAL	Abril Julio Octubre	OSWALDO VALLEJO



**AIRES ACONDICIONADOS**



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA**  
**2024**



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ

NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

AIRES ACONDICIONADOS							
N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	AIRE ACONDICIONADO	Gerencia	20133004	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora Limpieza general del equipo Limpieza desagüe Prueba de funcionamiento
2	AIRE ACONDICIONADO	Subgerencia Administrativa	20130030	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora Limpieza general del equipo Limpieza desagüe Prueba de funcionamiento
3	AIRE ACONDICIONADO	Área administrativa	20131470	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora Limpieza general del equipo Limpieza desagüe Prueba de funcionamiento
4	AIRE ACONDICIONADO	Facturación	20130902	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
5	AIRE ACONDICIONADO	Cuarto del Servidor	NA	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
6	AIRE ACONDICIONADO	Odontología	20131447	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora Limpieza general del equipo Limpieza desagüe Prueba de funcionamiento



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ

NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

AIRES ACONDICIONADOS							
N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVO FIJO	PERIODICIDAD	FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
7	AIRE ACONDICIONADO	Laboratorio clínico	20131477	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora Limpieza general del equipo Limpieza desagüe Prueba de funcionamiento
8	AIRE ACONDICIONADO	Vacunación	20131708	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
9	AIRE ACONDICIONADO	Vacunación - Tipo ventana	20130706	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
10	AIRE ACONDICIONADO	Observación Adulto Urg	20130146	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
11	AIRE ACONDICIONADO	Sala de Curaciones	20131444	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
12	AIRE ACONDICIONADO	Reanimación Urgencias	20130070	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
13	AIRE ACONDICIONADO	Historia Clínica	20130334	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora
14	AIRE ACONDICIONADO	Sala de Partos	20130668	TRIMESTRAL	Febrero Mayo Agosto Noviembre	OSWALDO VALLEJO	Limpieza de filtros Limpieza unidad condensadora

**CRONOGRAMA  
AÑO 2024**



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA  
2024**



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE ENERO 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	2	3	4	5	6
		INVENTARIO			
8	9	10	11	12	13
		CRONOGRAMA			
15	16	17	18	19	20
		PLAN DE MANTENIMIENTO			
22	23	24	25	26	27
		ENTREGA DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO			
29	30	31			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE FEBRERO 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
			1	2	3
5	6	7	8	9	10
		URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN AUTOCLAVE CONSULTA EXTERNA AMBULANCIAS VACUNACIÓN AIRES ACONDICIONADOS			
12	13	14	15	16	17
		URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN AUTOCLAVE CONSULTA EXTERNA AMBULANCIAS VACUNACIÓN AIRES ACONDICIONADOS			
19	20	21	22	23	24
		URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN AUTOCLAVE CONSULTA EXTERNA AMBULANCIAS VACUNACIÓN AIRES ACONDICIONADOS			
26	27	28	28		
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE MARZO 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
				1	2
4	5	6	7	8	9
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
11	12	13	14	15	16
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
18	19	20	21	22	23
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
25	26	27	28	29	30
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
 NIT 891.901.745-8  
 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE ABRIL 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	2	3	4	5	6
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
8	9	10	11	12	13
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
15	16	17	18	19	20
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
22	23	24	25	26	27
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
29	30				





E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE MAYO 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		1	2	3	4
		URGENCIAS			
		HOSPITALIZACIÓN			
		AUTOCLAVE			
		CONSULTA EXTERNA			
		AMBULANCIAS			
		VACUNACIÓN			
		AIRES ACONDICIONADOS			
6	7	8	9	10	11
		URGENCIAS			
		HOSPITALIZACIÓN			
		AUTOCLAVE			
		CONSULTA EXTERNA			
		AMBULANCIAS			
		VACUNACIÓN			
		AIRES ACONDICIONADOS			
13	14	15	16	17	18
		URGENCIAS			
		HOSPITALIZACIÓN			
		AUTOCLAVE			
		CONSULTA EXTERNA			
		AMBULANCIAS			
		VACUNACIÓN			
		AIRES ACONDICIONADOS			
20	21	22	23	24	25
		URGENCIAS			
		HOSPITALIZACIÓN			
		AUTOCLAVE			
		CONSULTA EXTERNA			
		AMBULANCIAS			
		VACUNACIÓN			
		AIRES ACONDICIONADOS			
27	28	29	30	31	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
 NIT 891.901.745-8  
 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE JUNIO 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
					1
3	4	5	6	7	8
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
10	11	12	13	14	15
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
17	18	19	20	21	22
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
24	25	26	27	28	29
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE JULIO 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	2	3	4	5	6
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
8	9	10	11	12	13
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
15	16	17	18	19	20
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
22	23	24	25	26	27
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
29	30	31			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
 NIT 891.901.745-8  
 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE AGOSTO 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
			1	2	3
5	6	7	8	9	10
		URGENCIAS			
		HOSPITALIZACIÓN			
		AUTOCLAVE			
		CONSULTA EXTERNA			
		AMBULANCIAS			
		VACUNACIÓN			
		AIRES ACONDICIONADOS			
12	13	14	15	16	17
		URGENCIAS			
		HOSPITALIZACIÓN			
		AUTOCLAVE			
		CONSULTA EXTERNA			
		AMBULANCIAS			
		VACUNACIÓN			
		AIRES ACONDICIONADOS			
19	20	21	22	23	24
		URGENCIAS			
		HOSPITALIZACIÓN			
		AUTOCLAVE			
		CONSULTA EXTERNA			
		AMBULANCIAS			
		VACUNACIÓN			
		AIRES ACONDICIONADOS			
26	27	28	29	30	31
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
 NIT 891.901.745-8  
 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE SEPTIEMBRE 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
2	3	4	5	6	7
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
9	10	11	12	13	14
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
16	17	18	19	20	21
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
23	24	25	26	27	28
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
30					



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
 NIT 891.901.745-8  
 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE OCTUBRE 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
	1	2	3	4	5
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
7	8	9	10	11	12
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
14	15	16	17	18	19
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
21	22	23	24	25	26
		URGENCIAS			
		ODONTOLOGÍA			
		AMBULANCIA			
		FISIOTERAPIA			
28	29	30	31		
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE NOVIEMBRE 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
				1	2
4	5	6	7	8	9
		URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN AUTOCLAVE CONSULTA EXTERNA AMBULANCIAS VACUNACIÓN AIRES ACONDICIONADOS			
11	12	13	14	15	16
		URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN AUTOCLAVE CONSULTA EXTERNA AMBULANCIAS VACUNACIÓN AIRES ACONDICIONADOS			
18	19	20	21	22	23
		URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN AUTOCLAVE CONSULTA EXTERNA AMBULANCIAS VACUNACIÓN AIRES ACONDICIONADOS			
25	26	27	28	29	30
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
 NIT 891.901.745-8  
 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2024

CRONOGRAMA MES DE DICIEMBRE 2024					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
2	3	4	5	6	7
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
9	10	11	12	13	14
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
16	17	18	19	20	21
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
23	24	25	26	27	28
		ODONTOLOGÍA			
		HOSPITALIZACIÓN			
		CONSULTA EXTERNA			
		LABORATORIO CLINICO			
30	31				
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			



**INVENTARIO DE EQUIPOS  
AÑO 2024**



**RESTREPO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA  
2024**



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE URGENCIAS

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 01

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
01	0001	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRÄGER	VISTA - 120 S	S2SNF3991	20131995	Reanimación	
01	0002	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE - 3	360250-M21118930016	20132018	Reanimación	
01	0003	DEFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ - 03035181	20131978	Reanimación	
01	0004	SUCCIONADOR	THOMAS	1240	41600003014	20131363	Reanimación	
01	0005	BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-i1	4008220	20131981	Reanimación	
01	0006	REGULADOR DE OXIGENO	AIR METAN	CONEXIÓN DIS	139921	20132051	Reanimación	
01	0007	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA	NR	20131072	Cuarto de Medicamentos	
01	0008	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	BOMBILLO HALOGENO	NR	20131071	Cuarto de Medicamentos	
01	0009	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	160KG	1600019392	20131932	Triage 2	
02	0010	MONITOR MULTIPARAMETRO	MINDRAY	EPM-10	AC7-044009300	20131980	Triage 2	
01	0011	BÁSCULA BEBÉ	SECA	354	8354300140887	20131383	Estación de Enfermería	
01	0012	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042 - M21118190074	20132013	Estación de Enfermería	
01	0013	REGULADOR DE OXIGENO	AIR METAN	CONEXIÓN DIS	NR	20131883	Estación de Enfermería	
01	0014	TENSIOMETRO PEDIÁTRICO	WELCH ALLYN	DURANSHOCK	101215154053	20130083	Estación de Enfermería	
01	0015	TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	DURANSHOCK	91006134961	20131482	Estación de Enfermería	
01	0016	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M19200980039	20131959	Estación de Enfermería	
01	0017	REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	CONEXIÓN DIS	139924	20132024	Estación de Enfermería	
01	0018	REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	CONEXIÓN DIS	139923	20132023	Estación de Enfermería	
01	0019	FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	Color negro	NA	Estación de Enfermería	
01	0020	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	408282	NR	20131134	Consultorio 2	
01	0021	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	PARED	141115164125	20131368	Consultorio 2	
01	0022	LAMPARA CIELITICA AUXILIAR	BRANDON	AMAX30FMS	7444/1	20131330	Procedimientos y curaciones	

ÁREA DE URGENCIAS

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 01

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
01	0023	NEBULIZADOR	DEVILBISS	5650D	NR	20130129	Triage	
01	0024	NEBULIZADOR	DEVILBISS	5650D	3D6043941	20130130	Triage	
01	0025	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	160K	1600016943	20131787	Triage 1	
01	0026	MONITOR MULTIPARAMETRO	BLT	M7000	M069E009883	20131280	Triage 1	
01	0027	REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	CONEXIÓN DIS Pediátrico	139924	20132025	Estación de Enfermería	



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 02

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
02	0001	AUTOCLAVE	DENTOMAT	3400	3400-0056	20131647	Esterilización	
02	0002	BÁSCULA BEBÉ	SECA	3341321008	5334126135547	20131366	Sala de partos	
02	0003	LAMPARA AUXILIAR DE CIRUGÍA	WELCH ALLYN	GS 300	NR	20130383	Sala de partos	
02	0004	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	FIBRA OPTICA	NR	20131077	Sala de partos	
02	0005	MESA CALOR RADIANTE	CLINILAB	CLINI WARM II	NR	20130381	Sala de partos	
02	0006	MESA DE PARTOS	DOMETAL	VC-202F	18204	20130389	Sala de partos	
02	0007	SUCCIONADOR QUIRÚRGICO	THOMAS	MEDI-PUMP 1130D	0000260-0392	20130384	Sala de partos	
02	0008	REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	CONEXIÓN DIS	117188	20132026	Sala de partos	
02	0009	MONITOR FETAL	EDAN	F3	330048-M12300160022	20130181	Maternidad	
02	0010	TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	DURANSHOCK	150723213349	20131983	Estación de Enfermería	
02	0011	PULSOXIMETRO	EDAN	H-100B	316036-M1280314002	20131248	Estación de Enfermería	
02	0012	FONENDOSCOPIO	LITTMAN	CLASSIC III	NR	20131954	Estación de Enfermería	
02	0013	MONITOR MULTIPARAMETRO	EDAN	M8	M83031011695LB	20130061	Medicina Interna mujer	
02	0014	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRÄGER	VISTA 120S	S2SNF3547	20132036	Estación de Enfermería	
02	0015	MONITOR MULTIPARAMETRO	BLT	M8000	M012E001829	20131329	Medicina Interna hombres	



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 03

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
03	0001	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	408282	NR	20130996	Consultorio 1	
03	0002	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	PARED	180113114995	20131714	Consultorio 1	
03	0003	BÁSCULA DIGITAL DE PISO	SECA	DIGITAL	8813069222261	20132062	Consultorio 1	
03	0004	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	142KL	1420089768	20132039	Consultorio 1	
03	0005	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	408282	NR	20131011	Consultorio 2	
03	0006	TENSIOMETRO DE PARED	TENSOMED	NR	NR	20131012	Consultorio 2	
03	0007	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	142KL	1420089631	20132038	Consultorio 2	
03	0008	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	408282	NR	20130985	Consultorio 3	
03	0009	TENSIOMETRO DE PARED	TENSOMED	NR	NR	20130984	Consultorio 3	
03	0010	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	142KL	1420089630	20132040	Consultorio 3	
03	0011	NEGATOSCOPIO	NR	NR	NR	20131174	Pasillos consultorios	
03	0012	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	160K	1600017989	20131716	Crónicos	
03	0013	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	408282	NR	20131777	Crónicos	
03	0014	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	PARED	180116181105	20131713	Crónicos	
03	0015	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	142KL	1420089769	20132041	Crónicos	
03	0016	TENSIOMETRO ADULTO	GMD	ANEROIDE	17061615	20132084	Hipertensión y Diabetes	
03	0017	FONENDOSCOPIO	LITTMAN	CLASSIC III	NR	20132042	Hipertensión y Diabetes	
03	0018	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	160K	1600016019	20131715	Consultorio 4 - PyP	
03	0019	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX0365704-14	20131364	Consultorio 4 - PyP	
03	0020	TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	500905183843	20131547	Consultorio 4 - PyP	
03	0021	BÁSCULA GRAMERA	NR	MP 25	NR	20130566	Crecimiento y Desarrollo	
03	0022	TENSIOMETRO ADULTO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	170717115809	20131675	Crecimiento y Desarrollo	
03	0023	TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	141023134837	20131676	Crecimiento y Desarrollo	
03	0024	FONENDOSCOPIO	LITTMAN	DOBLE SERVICIO	NR	20131926	Crecimiento y Desarrollo	
03	0025	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKED JUNIOR	NR	20131674	Crecimiento y Desarrollo	
03	0026	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	160K	1600023293	20132037	Crecimiento y Desarrollo	
03	0027	BÁSCULA DE PISO	HEALTH O METER	160K	1600017294	20131743	Citología y Planificación	
03	0028	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS 300	NR	20130103	Citología y Planificación	
03	0029	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD2	FD2P30423334-11	20130182	Citología y Planificación	
03	0030	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	360250-M22805720035	20132056	Curaciones	



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE ODONTOLOGÍA

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 04

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
04	0001	UNIDAD ODONTOLÓGICA	ARDENT	SEMI-ELECTRICA	NR	20130631	CONSULTORIO 1	
04	0002	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	NSK	PANAMAX 2R	ABHY0167	NA	CONSULTORIO 1	
04	0003	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD	COXO	CX - 235 - 3F	L703 - 3387	NA	CONSULTORIO 1	
04	0004	LAMPARA DE FOTOCURADO	DBA	LED C	L16A1290C	20131757	CONSULTORIO 1	
04	0005	UNIDAD ODONTOLÓGICA	BELMONT	ELECTRICA	NR	20130639	CONSULTORIO 2	
04	0006	LAMPARA DE FOTOCURADO	DBA	LED C	L16A1456C	20131758	CONSULTORIO 2	
04	0007	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	NSK	PANAMAX 2R	ABHY0169	NA	CONSULTORIO 2	
04	0008	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD	COXO	CX - 235 - 3F	M203-2615	NA	CONSULTORIO 2	
04	0009	UNIDAD ODONTOLÓGICA	ARDENTAL	SEMI-ELECTRICA	NR	20130658	CONSULTORIO 3	
04	0010	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD	NSK	EX 203C	ABE30192	NA	CONSULTORIO 3	
04	0011	LAMPARA DE FOTOCURADO	DBA	LED D	L1481101D COLOR AZUL	20131756	CONSULTORIO 3	
04	0012	CAVITRON	DENTSPLY	BOBCAT PRO	130-39562	20131494	CONSULTORIO 3	
04	0013	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	OCCIDENTALES	PORTATIL	NR	20131825	CUARTO RAYOS X	
04	0014	RAYOS X	FIAD	XPLORE-X	NR	20130675	CUARTO RAYOS X	
04	0015	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	NSK	PANAMAX 2R	ABJY0063	NA	ODONTOLOGÍA	
04	0016	AMALGAMADOR	KERR	AUTOMIX 23425	028801	20130669	ODONTOLOGÍA	
04	0017	NEGATOSCOPIO	ARDENT	NR	NR	20131985	ODONTOLOGÍA	
04	0018	AUTOCLAVE	OCCIDENTALES	STERI CLAVE	A12072019-1V5	20131933	ODONTOLOGÍA	
04	0019	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD	NSK	PANA AIR	DBEY0748	NA	CIRUGÍA	
04	0020	COMPRESOR	SHULTZ	MSV 3	985165	20131049	AREA DE COMPRESORES	
04	0021	COMPRESOR	SHULTZ	MSV 6	2866707	20131050	AREA DE COMPRESORES	
04	0022	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	OCCIDENTALES	PORTATIL	NR	20130735	ALMACEN	
04	0023	LAMPARA CUELLO CISNE	KRAMER	GENERICA	NR	20131555	Consultorio 2	
04	0024	PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD	COXO	CX - 235 - 3F	M203-2632	NA	HIGIENE ORAL	



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE AMBULANCIAS

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 05

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
05	0001	FLUJOMETRO DE PARED	GENTEC	PARED	NR	20131613	PLACA OCI 850	
05	0002	FONENDOSCOPIO ADULTO	LORD	DOBLE SERVICIO	NR	20131303	PLACA OCI 850	
05	0003	MONITOR MULTIPARAMETRO	BLT	M7000	M009E009904	20131300	PLACA OCI 850	
05	0004	SUCCIONADOR	PULMO MED	7E-A	00252	20131306	PLACA OCI 850	
05	0005	REGULADOR DE OXIGENO Precalibrado	GENTEC	NR	NR	20131483	PLACA OCI 850	
05	0006	TENSIOMETRO ADULTO	LORD	ANEROIDE	1028966	20131614	PLACA OCI 850	
05	0007	TENSIOMETRO PEDIATRICO	LORD	ANEROIDE	1015755	20131301	PLACA OCI 850	
05	0008	REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE	GENTEC	PIND INDEX	NR	20131491	PLACA OCI 850	
05	0009	FLUJOMETRO DE PARED	GENTEC	FM-197B-15L-CH	NR	20131490	PLACA OCI 851	
05	0010	FONENDOSCOPIO ADULTO	LORD	DOBLE SERVICIO	NR	20131281	PLACA OCI 851	
05	0011	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	LORD	HS - 30H	NR	20131283	PLACA OCI 851	
05	0012	MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDIANA	M20	110513030012	20131132	PLACA OCI 851	
05	0013	SUCCIONADOR	PULMO MED	7E-A	00146	20131288	PLACA OCI 851	
05	0014	REGULADOR DE OXIGENO Precalibrado	GENTEC	NR	NR	20131489	PLACA OCI 851	
05	0015	REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE	AIR IMETAN	PIND INDEX	NR	20131484	PLACA OCI 851	
05	0016	TENSIOMETRO ADULTO	LORD	ANEROIDE	1028978	20131281	PLACA OCI 851	
05	0017	TENSIOMETRO PEDIATRICO	LORD	ANEROIDE	1015720	20131282	PLACA OCI 851	
05	0018	SUCCIONADOR	DOCTOR'S	7E - D	NR	20131620	PLACA ONI 875	
05	0019	FLUJOMETRO DE PARED	AMVEX	PARED	NR	20131619	PLACA ONI 875	
05	0020	REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE	AIR METAN	PORTABLE R-915	169857	20141488	PLACA ONI 875	



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE LABORATORIO

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 06

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
06	0001	CENTRIFUGA 24 TUBOS	OSS	TDL4-A	2015100046	20131495	LABORATORIO	
06	0003	HORNO	MEMMERT	NR	NR	20130789	LABORATORIO	
06	0004	BAÑO MARIA	MEMMERT	NR	NR	20130771	LABORATORIO	
06	0005	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX21FS1	4F01452	20130778	LABORATORIO	





E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE VACUNACIÓN

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 07

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
07	0001	NEVERA HORIZONTAL	HAIER	HBC-260	BE0G9 5EAS0 0QEM8 30041	20132029	Vacunación	
07	0002	NEVERA HORIZONTAL	HAIER	HBC-260	BE0G9 5EAS0 0QEM8 40020	20132061	Vacunación	
07	0003	NEVERA VERTICAL	MABE	NO FROST	NR	20130709	Vacunación	
09	0004	AIRE ACONDICIONADO	KALLEY	K-BACS121NB02	2400729140361070120397	20131708	Vacunación	
09	0005	AIRE ACONDICIONADO	NR	Tipo Ventana	NR	20130706	Vacunación	



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE FISIOTERAPIA

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 08

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
08	0001	ULTRASONIDO	ROSCOE MEDICAL	SOUNDCARE	SZ9170600055	20131805	Fisioterapia	
08	0002	CAMINADORA	SPORTFITNESS	NR	NR	20131706	Fisioterapia	
08	0003	ELÍPTICA	SPORTFITNESS	NR	NR	20131707	Fisioterapia	
08	0004	BICICLETA ESTÁTICA	SPORTFITNESS	NR	NR	20131708	Fisioterapia	
08	0005	RESTAURADOR	NR	NR	NR	20131816	Fisioterapia	
08	0006	MASAJEADOR ELÉCTRICO	Model Beauty	GB-818	NR	N/A	Fisioterapia	
08	0007	TENS	INTENSITY	5000	NR	20131911	Fisioterapia	



E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ  
NIT 891.901.745-8  
RESTREPO, VALLE DEL CAUCA  
INVENTARIO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS

ÁREA DE AIRES ACONDICIONADOS

Fecha de elaboración: Enero 2024

Código Área: 09

ÁREA	ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO FIJO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
09	0001	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	CMF121E	CMF121E7092000225	20133004	Gerencia	
09	0002	AIRE ACONDICIONADO	CONFORT FRESH	KFR2520GW	2006003065	20130030	Subgerencia	
09	0003	AIRE ACONDICIONADO	HACEB	ASSENTO	NR	20131470	Área administrativa	
09	0004	AIRE ACONDICIONADO	LG	LS-0082AAL	NR	20130902	Facturación	
09	0005	AIRE ACONDICIONADO	HACEB	HAO169BTI	1102012180909	NR	Cuarto del Servidor	
09	0006	AIRE ACONDICIONADO	Samsung	Mini Split	Y5MUPAJF7000118	20131447	Odontología	
09	0007	AIRE ACONDICIONADO	HYUNDAI	MSE-18CR	C101166240310114120083	20131477	Laboratorio clínico	
09	0008	AIRE ACONDICIONADO	KALLEY	K-BACS121NB02	2400729140361070120397	20131708	Vacunación	
09	0009	AIRE ACONDICIONADO	NR	Tipo Ventana	NR	20130706	Vacunación	
09	0010	AIRE ACONDICIONADO	CONFORT FRESH	KFR5020GW	2006005457	20130146	Observación Adulto Urgencias	
09	0011	AIRE ACONDICIONADO	HACEB	ASSENTO	NR	20131444	Sala de curaciones - Cext	
09	0012	AIRE ACONDICIONADO	CONFORT FRESH	KAFR2520GW	2006003068	20130070	Reanimación	
09	0013	AIRE ACONDICIONADO	PANASONIC	GW-150020	NR	20130334	Historia clínica	
09	0014	AIRE ACONDICIONADO	CARRIER	42LFC012308	3069680600983	20130668	Sala de Partos	